

重要 活動量計 (AM-150) スタートアップガイド

- 1 「HealthPlanet」に
会員登録する。

<http://www.healthplanet.jp/>

すでに「からだカルテ」「HealthPlanet」の会員の方
自分のアカウントで各サイトにログインし、2の設定を
行ってください。

- 2 ログインし手順に従い活動量計の登録をする。

「HealthPlanet」会員の場合

「登録情報の確認・変更」>「測定機器登録」>「機器を登録する」>
シリアル情報を入力し「内容を確認する」>「送信する」で登録完了

「からだカルテ」会員の場合

「登録変更」>「測定機器の一覧」>「機器を追加する」>シリアル情報を入力し「内容を確認する」>
「送信する」で登録完了

- 3 活動量計に電池を入れる。
(液晶に FFFFF が表示される)



- 4 下記の手順にて初期通信し、活動量計データ送信を行う。

1. ローソン店頭端末Loppi・ ミニストップ店頭端末MINISTOP Loppiでの通信方法

- 1 Loppi の FeliCa リーダー
部に活動量計をかざす。



※活動量計は表面を上にして、横向きに置いてください。
正しく置かなかった場合、失敗する可能性があります。

- 2 データが読み込まれる。



- 3 活動量計データの送信が
完了し 送信完了画面が
表示される。

2. AM-150 対応 Android™ スマートフォンでの通信方法

- 1 ヘルスプラネットアプリ
をインストールする。
(無料 Android™ アプリ)



- 2 会員登録をしたからだカルテの
ID・パスワードでログイン。

- 3 通信画面にて活動量計をかざし通信する。

- 4 活動量計データの送信が完了し
送信完了画面が表示される。



1. 「データ入力」
をタップ
2. 「歩数」タブ⇒
「歩数計から入
力する」をタップ
3. 歩数画面
から通信する
4. 通信・完了
画面が表示

【ご確認ください】

活動量計 AM-150 対応スマートフォン一覧

<http://www.healthplanet.jp/apps/am150/>

※Android™はGoogle Inc.の商標または登録商標です。
※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。